



ANDROME MEDICAL

Votre distributeur santé

Notice d'utilisation Easy-Fuzz

Assistant de remplissage pour diffuseur médical



AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

- **EASY-FUZZ® est un assistant de remplissage destiné exclusivement à la préparation d'un diffuseur médical.**
- **EASY-FUZZ® ne doit en aucun cas être connecté directement à un patient.**
- **Utiliser uniquement les consommables fournis ou validés par Androme Medical.**
- **Toute utilisation non conforme à cette notice engage la responsabilité de l'utilisateur.**

Table des matières

1. Introduction
2. Avertissements
3. Description du produit
4. Procédure d'utilisation
5. Signification du voyant
6. Nettoyage
7. Maintenance
8. Signification des symboles utilisés
9. Données techniques
10. Gestion des déchets



1. Introduction

Nom commercial : EASY-FUZZ®

Il s'agit d'un dispositif ergonomique pour les paramédicaux.

Usage prévu

EASY-FUZZ® est un assistant de remplissage destiné exclusivement à la préparation d'un diffuseur médical.


Utilisateur cible

Produit réservé à un usage professionnel de santé.

2. Avertissements

Liste des dangers potentiels et des situations où le produit ne doit pas être utilisé -> EASY-FUZZ® ne doit en aucun cas être connecté directement à un patient.

3. Description du produit

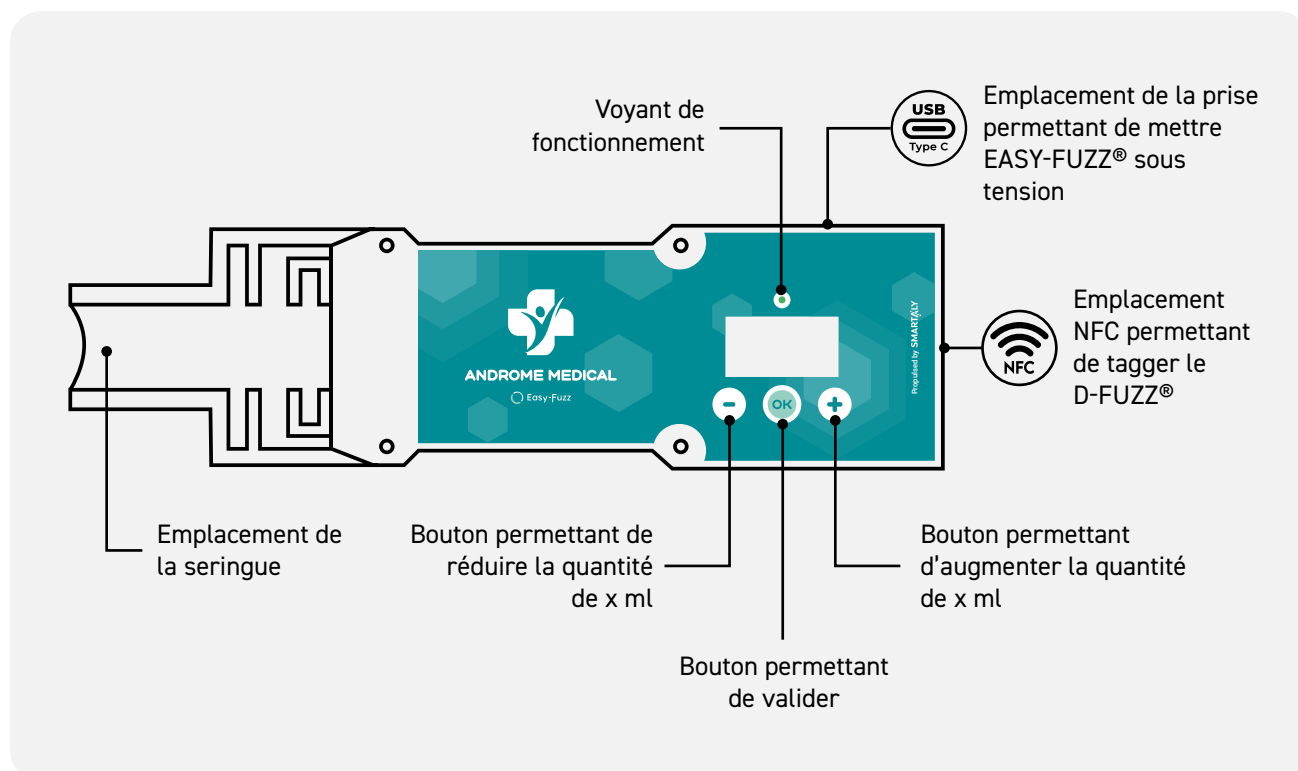


Contenu de la boîte

- 1 housse de rangement
- 1 boîtier EASY-FUZZ®
- 1 chargeur

4. Procédure d'utilisation

Etape 1

Mettre l'appareil EASY-FUZZ® sous tension.

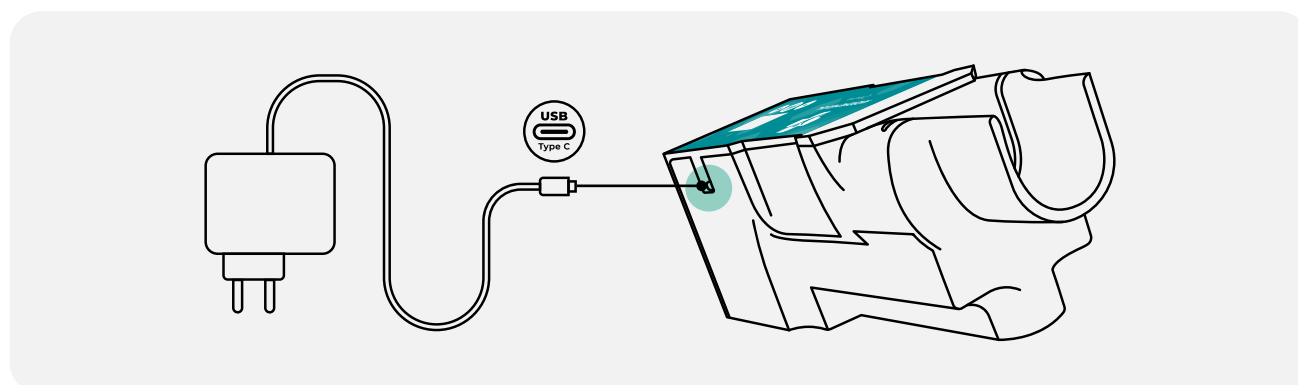


Etape 2

À la mise sous tension, l'appareil démarre automatiquement.

L'utilisateur peut observer le déplacement de l'embout interne correspondant à la phase d'**auto-calibrage** de l'appareil.

Etape 3


Présenter le **tag NFC** au niveau de la zone prévue à l'arrière de l'appareil afin d'activer EASY-FUZZ®.

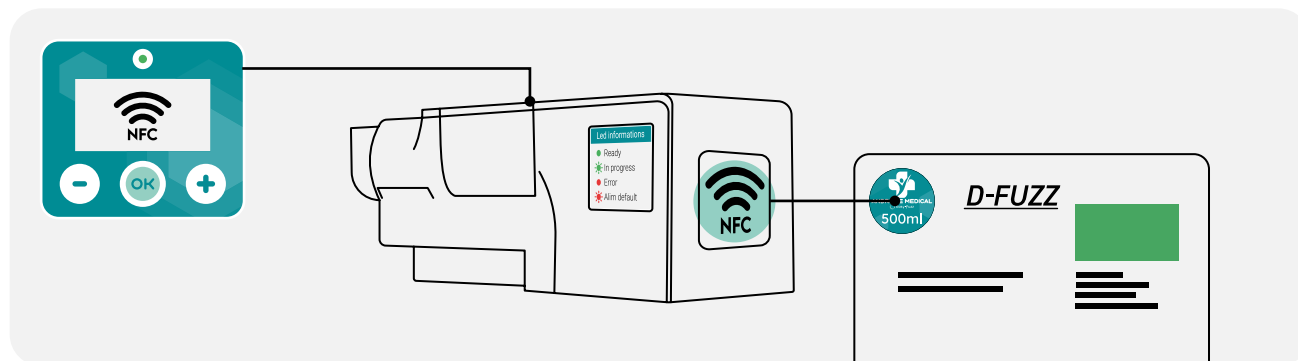

Etape 4

Percuter la **tubulure de transfert** dans le soluté, puis raccorder la **seringue** fournie par Androme Medical **uniquement**.

⚠ L'utilisation d'autres seringues est strictement interdite.

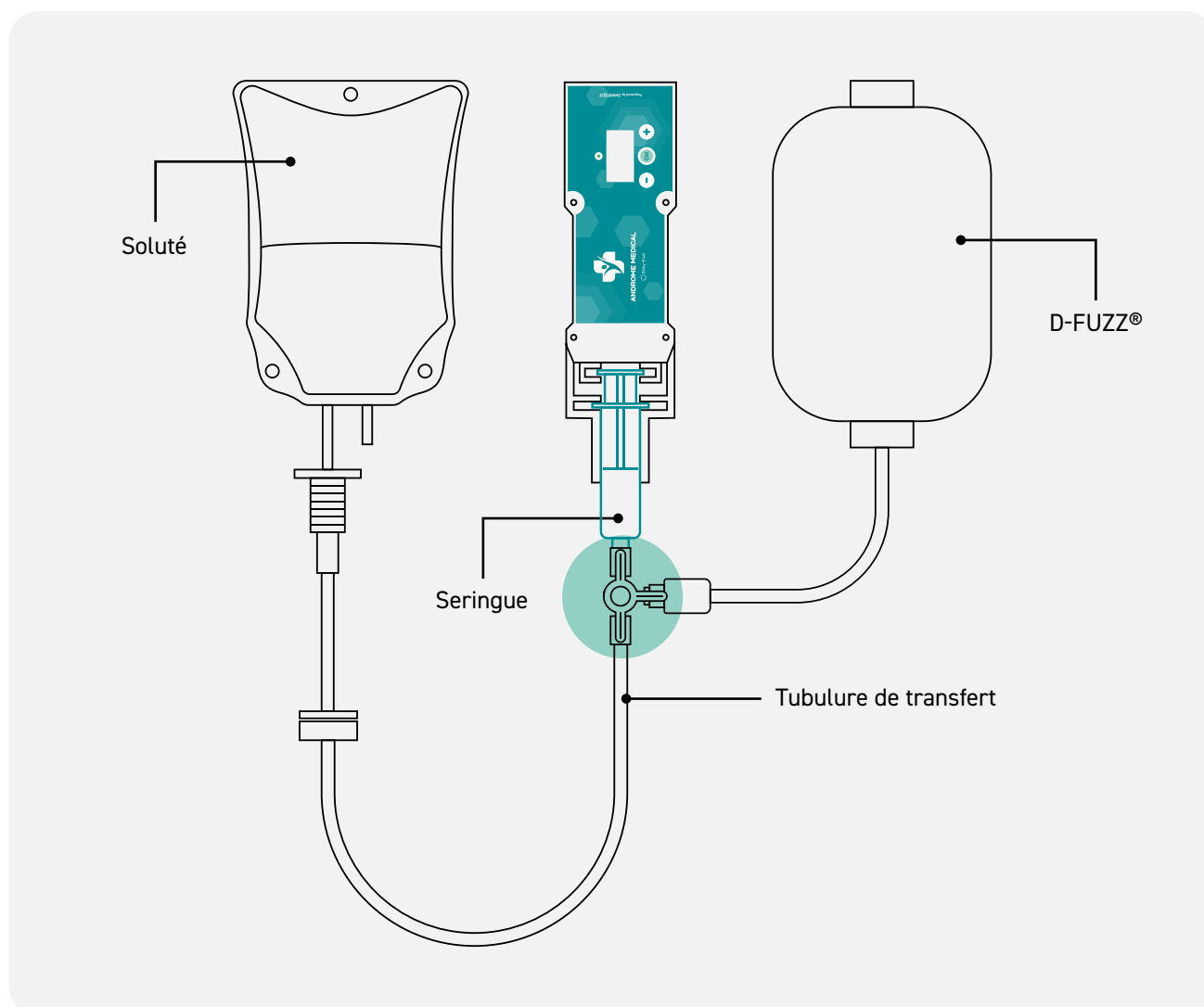

Etape 5


Procéder à la **purge complète** de la tubulure, et du soluté afin d'éliminer totalement l'air.

Etape 6

Raccorder le robinet de la tubulure au site de remplissage du **diffuseur médical D-FUZZ®**.


Etape 7

Positionner la seringue correctement sur le support prévu à cet effet sur EASY-FUZZ®.

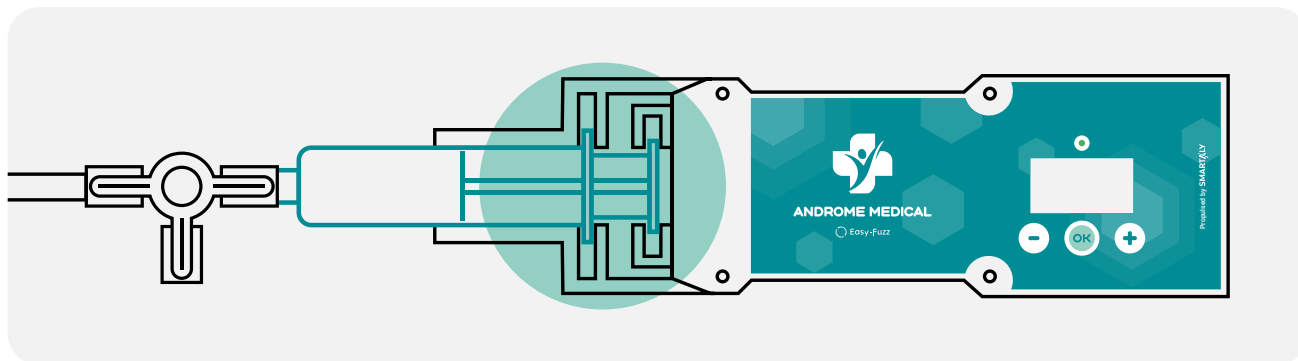

Etape 8

Ajuster la **quantité souhaitée** à l'aide de l'interface de commande (+ ou -).

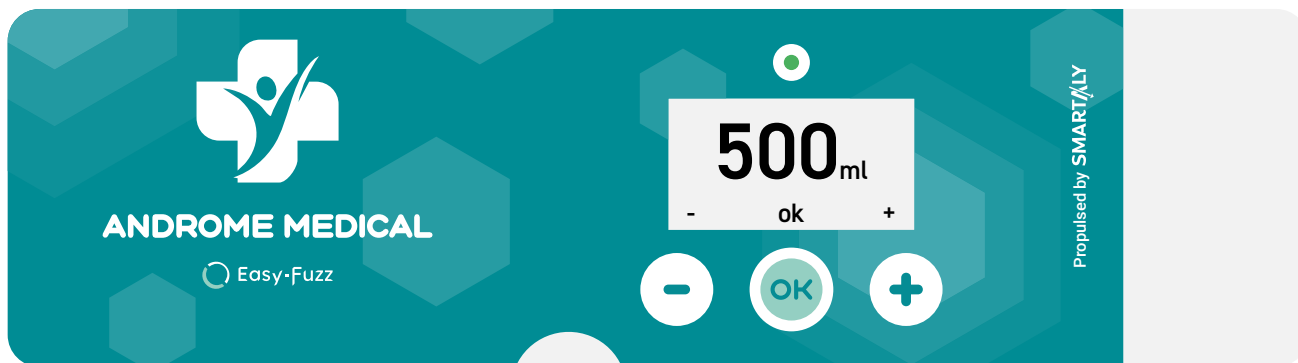

Etape 9

Appuyer sur le bouton « **OK** » pour lancer le cycle de remplissage.

Etape 10

À la fin du remplissage, l'appareil émet un **signal sonore (bip)** indiquant la fin du cycle.

5. Signification du voyant

	Voyant	Indication	Recommandation
●	Vert	Prêt	Commencer par tagger votre D-FUZZ®
●	Vert clignotant	En cours	Ne pas toucher durant le remplissage
●	Rouge	Erreur	Débrancher et rebrancher EASY-FUZZ®
●	Rouge clignotant	Problème d'alimentation	Éteindre EASY-FUZZ® en faisant un appuie long sur « OK »

6. Nettoyage

Méthodes autorisées : lingette désinfectantes.

Ne pas mouiller ou immerger.

Fréquence : après chaque utilisation.

7. Maintenance

Maintenance annuelle effectuée par nos soins, comprenant une vérification des fonctions ainsi qu'un graissage de la vis sans fin.

8. Signification des symboles utilisés

Symbole	Signification
	NFC Afficher sur l'écran : vous devez tagger le D-FUZZ® pour commencer le remplissage. Sur le boîtier EASY-FUZZ® : endroit où tagger le D-FUZZ®.
	USB type C Type de branchement pour relier EASY-FUZZ® au secteur. N'utiliser uniquement que le chargeur fourni avec EASY-FUZZ®.
	Type de voyant Voyant d'une certaine couleur éclairé constamment (ne clignote pas).
	Type de voyant Voyant d'une certaine couleur clignotant.
	Type de recyclage Obligation d'une collecte séparée.
	Plus Présent sur l'avant du EASY-FUZZ®, il permet d'incrémenter les ml à remplir de X.
	Moins Présent sur l'avant du EASY-FUZZ®, il permet de diminuer les ml à remplir de X.


9. Données techniques

Dimensions : 220(L)x95(l)x120(p) mm

Poids : 920gr

Voltage : 20V / USB-C 65W PD

10. Gestion des déchets

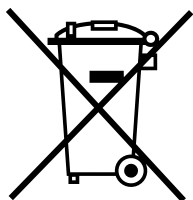

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

Il doit être collecté séparément et déposé dans un point de collecte approprié afin d'être recyclé ou traité conformément à la réglementation en vigueur.

Le symbole de la poubelle barrée indique l'obligation d'une collecte séparée.

En respectant ces consignes, vous contribuez à la protection de l'environnement et de la santé humaine.

Identification du dispositif

ANDROME Medical EasyFuzz

Numéro de série : Voir sur l'appareil (étiquette grise)

Fabricant et mandataire

ANDROME, 360 Zac Saint Esteve, 06640 Saint Jeannet